



**HeelWedge®**  
Fersenentlastungsschuh

**Zur Abheilung von Wunden im Fersenbereich,  
bei Fersensporn und nach Fersenverletzungen.**

Der **HeelWedge® Fersenentlastungsschuh** wird zur gezielten Entlastung des Fersenbereiches eingesetzt. Die durchgehende Sohle schützt die Ferse. Durch den Aufbau und die Konstruktion der Sohle findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- und Vorfuß statt.



**TAS®**  
Hallux Valgus Zehenschiene

**Nach Hallux Valgus-, Hammerzehen- und  
Schneiderzehen-Operationen.**

Die **TAS® Hallux Valgus Zehenschiene** kommt nach operativen Eingriffen zum Einsatz. Die operierten / korrigierten Zehen werden durch gezielte Ausrichtung in der gewünschten Position gehalten. Das weiche Material und der Verzicht auf starre Kunststoffelemente sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.

Praxisstempel



## Postoperative Versorgung

**Operationen oder Verletzungen am Fuß –  
wie kann ich laufen?**

**Herausgeber**  
DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting | Germany  
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0  
Fax +49 (0) 88 07.92 28-22  
info@darco.de | www.darco.de

100419



**DARCO**

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

diese Broschüre fasst die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsgebiete von postoperativen Hilfsmitteln zusammen.

Nach Operationen oder Verletzungen am Fuß sowie bei Erkrankungen aufgrund von Fehlstellungen stellt sich die Frage nach dem »richtigen Schuh«.

Höchstes Ziel sind die Ruhigstellung des Fußes nach der Operation, die Förderung des Heilungsverlaufes sowie die Wiederherstellung der Beweglichkeit des Patienten.

DARCO hat seit vielen Jahren sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Schuhmodellen gesetzt, die genau diese Versorgung umfassen.

Wir können Ihnen helfen, trotz Ihrer Einschränkung besser am alltäglichen Leben teilnehmen zu können – sei es beruflich, privat oder in der Freizeit.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Anwendungsgebiete und Handhabung der verschiedenen Schuhmodelle informieren.

Ihr behandelnder Arzt, ein Sanitätshaus oder ein Orthopädiefachgeschäft in Ihrer Nähe berät Sie gerne.



OrthoWedge™  
Vorfußentlastungsschuh



OrthoWedge™ Light  
Vorfußentlastungsschuh



TwinShoe  
Ausgleichsschuh



Der (Original) MedSurg™ ist auch in einer Kindergröße erhältlich.



(Original) MedSurg™  
Verbandschuh

Nach Eingriffen bei Hallux Valgus-, Hammerzehen- und Krallenzehen-Operationen sowie zur Abheilung von Vorfußwunden.

Der OrthoWedge™ Vorfußentlastungsschuh wurde speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes entwickelt. Seine durchgehende Sohle gewährt dem Patienten beim täglichen Tragen Schutz von der Unterseite, zum Beispiel vor Treppen, Stufen oder Straßenschmutz. Durch die Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel-, beziehungsweise Rückfuß statt. Der Vorfuß wird somit nicht belastet. Die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breitereinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg in den Schuh.

Als Partnerschuh zu den Entlastungsschuhen OrthoWedge™/ Light und HeelWedge®.

Der TwinShoe gewährleistet durch den Ausgleich des Höhenunterschieds ein physiologisch richtiges Gangbild.

Nach Operationen bei Hallux Valgus, Hammerzehen und Krallenzehen sowie zur Mobilisierung bei umfangreichen Verbänden.

Der MedSurg™ Verbandschuh ist überall dort zum Standard geworden, wo nach Operationen Stabilität, Stoß- und Druckentlastung notwendig sind. Das luftdurchlässige, dehnbare Nylongewebe des Obermaterials erlaubt das Tragen auch bei sehr umfangreichen Verbänden. Die eingearbeitete Sohlenversteifung verhindert ein Abrollen des Fußes und bietet somit einen optimalen Schutz des operierten Fußes.