

Anwendungshinweise

1. Achten Sie beim Bekleiden auf das Tape, um möglichst keine Enden abzulösen.
2. Sollten sich Enden ablösen, können Sie den abgelösten Bereich mit einer Schere abschneiden um weiteres Ablösen zu verhindern.
3. Sie können mit dem **DARCO Elastic Tape** unbeschwert duschen. Bitte vermeiden Sie Seife oder andere Reinigungsmittel im getapten Bereich.
4. Beim Trocknen, den getapten Bereich abtupfen und mit dem Föhn trocknen.
5. Bitte beachten Sie, dass jeder Mensch eine individuelle Haut hat. Es können also auch beim Tapen Hautirritationen oder Allergien ausgelöst werden. Im Falle von Juckreiz oder Übelkeit empfiehlt es sich, das Tape sofort abzunehmen.
6. Die Abnahme sollte langsam erfolgen um die Haut nicht zu verletzen. Halten Sie die Haut fest und lösen Sie langsam das Tape vom beklebten Bereich. Legen Sie die Hand auf den vorherig beklebten Bereich um die Haut zu beruhigen.
7. Eventuell zurückbleibende Kleberreste können mit Seife und warmem Wasser entfernt werden.
8. Bitte vermeiden Sie Eigenanlagen, wenn Sie sich über die Anlage nicht 100 % sicher sind.

In akuten Fällen von Unverträglichkeit oder bei Fragen, sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten.

Überreicht durch:



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0
Fax +49 (0) 88 07.92 28-22
info@darco.de | www.darco.de



110328



Tape-Behandlung

**Muskel- oder Sehnenbeschwerden?
Kopfschmerzen?**



DARCO

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,


diese Broschüre fasst die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen der Tape-Versorgung zusammen.

Im medizinischen Bereich sind innovative Therapieverfahren von großer Bedeutung. Eine dieser neuen Methoden stellt das Elastische Tape dar. Aus der Kinesiologie stammend – einer Behandlungsform unter Beachtung der Bewegungslehre (kinesis = Bewegung) – findet das Elastic Tape nun über den Profisport hinaus auch in der Physiotherapie und behandlungsunterstützender Anwendung.


Sinn des Therapieverfahrens ist es, dem Körper entsprechende Hilfestellung zu geben, um durch richtige Bewegungen und propriozeptive Reize den Selbstheilungsprozess anzuregen. Je nach Anlagetechnik wird das Tape in vielen Bereichen, prinzipiell bei allen Schmerzzuständen, die durch Muskeln oder Sehnen hervorgerufen werden, eingesetzt; zum Beispiel:

- > HWS-Syndrom
(Kopfschmerz, muskuläre Hypertonie, Arthrose)
- > LWS-Syndrom (Ischialgien, ISG-Blockierung)
- > Schulterluxation
- > Knie Instabilität
- > Patellasehnen-Beschwerden
- > Muskelverletzungen
- > Spastiken
- > Lymphödem

Ihr behandelnder Arzt oder Therapeut berät Sie gerne, um auch Ihnen eine schnellere Heilung zu ermöglichen.

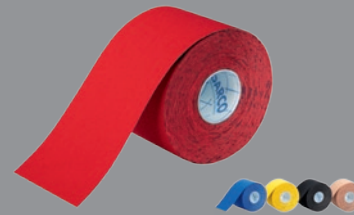

DARCO Elastic Tape
Elastisches Tape für die Kinesiologie

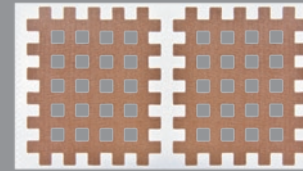

DARCO X-patch
Gitter-Tape



DARCO Standard Tape
Unelastisches Stabilisierungstape



DARCO Underwrap
Kohäsive elastische Unterzugbinde

Gegen Muskelbeschwerden und zur Leistungsverbesserung durch permanente Stimulation.

Das **DARCO Elastic Tape** ist ein Sport- und Therapietape. Es ist wie unsere Haut zu circa 30 – 40 % dehnbar. Das kinesiologische Tape wird weltweit in vielen Bereichen des Sports ebenso erfolgreich eingesetzt, wie bei Patienten in physiotherapeutischer Behandlung.

Zur punktuellen Behandlung und Entlastung.

Das **DARCO X-patch** eignet sich zur Behandlung von Schmerz- und Triggerpunkten sowie von Akupunkturbahnen. Auch Verklebungen der Faszien unter Narben werden gelöst. Das DARCO X-patch ist wasserresistent und kann mehrere Tage ohne Einschränkung getragen werden. Es besteht aus unelastischem Nylongewebe mit Acrylkleber.

Zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln, als Alternative zu Bandagen.

Das **DARCO Standard Tape** wird zur Stabilisierung von Gelenken und Muskeln eingesetzt. Die Verwendung dieses Tapes ist weltweit bekannt. Es bietet gerade im Sportbereich eine gute Alternative zu Bandagen, da es individuell den Gegebenheiten, wie Sportart, Verletzungsrisiko und Physiognomie des Trägers angepasst werden kann.

Zum präventiven Hautschutz und zur Fixierung von behandlungsunterstützenden Hilfsmitteln.

Die **DARCO Underwrap** ist eine längselastische, sehr dünn gewebte Binde mit selbsthaftender Eigenschaft. Die Unterzugbinde kommt bei leichter Kompressionsbehandlung wie auch zum präventiven Hautschutz zum Einsatz. Des Weiteren dient sie der Fixierung von behandlungsunterstützenden Hilfsmitteln wie zum Beispiel Eis zur Kühlung.