

Body Armor® Heel Reliever

Fersen-Freilagierung

Effektive Druckentlastung im Fersenbereich für Liegendpatienten

Hilfsmittelnummer:

11.11.05.0040 (genoppt) und 11.11.05.0041 (glatt)



INDIKATIONEN

- > Zur Prävention und Abheilung von Druckgeschwüren an der Ferse, bei diabetischem Fußsyndrom bzw. Dekubitus
- > 14 Punkte oder weniger auf der Braden-Skala
- > Diabetes mit neurologisch sensorischen Ausfallerscheinungen
- > Nicht tastbarer Fußpuls
- > Querschnittlähmung
- > Lang anhaltende Immobilität oder Koma

Die Innenseite ist in zwei Schaumstoffvarianten erhältlich: Genoppt oder glatt



DARCO

Alle Vorteile auf einen Blick



Vorfußriemen und Vorfußpolster

- > Hält den Fuß sicher in gewünschter Position
- > Zur Druckumverteilung
- > Polster verhindert Hautkontakt mit Vorfußriemen

Abgeschrägte Schaumstoffkanten und -ecken

- > Verhindern Druck an den Rändern
- > Erleichtert das überlappende Schließen

Ideale Lagerung

- > Auch bei Vakuumtherapie

Schweißnähte

- > Für weniger Irritation

Klettbänder

- > Für einfaches Handling
- > Zur Stabilisierung der Fußposition
- > Mit abgenähten Rändern

Belüftungslöcher

- > Fördern Luftzirkulation
- > Regulieren Hautklima

Etikett am Produkt

- > Beschriftbar
- > Mit QR-Code zur Gebrauchsanleitung

Extra hohes Fußsteil

- > Fasst auch große Füße
- > Sichert orthograde Position
- > Verhindert Fallfuß
- > Vermeidet Fußrotation
- > Lässt Bewegungsspielraum zu

Langes, innen fixiertes Wadenpolster (30 cm)

- > Verlagert Druck von der Ferse
- > Vermeidet Hyperextension des Knies

Glatte Unterseite

- > Ermöglicht ein „Gleiten“ über das Bettlaken ohne Beeinträchtigung der Fußposition in der Hohllagerung

Fersenöffnung

- > Zur visuellen Kontrolle der korrekten Freilagerung der Ferse



Flexible Größenanpassung (One-Size-Fits-All)



Zur individuellen Anpassung kann der lange Schienbeinflügel überlappend fixiert werden. Auch schmale Waden werden so stabil in Position gehalten.

Einfacher Zuschnitt



Zusätzlich zum innen fixierten Wadenpolster ermöglicht das im Lieferumfang enthaltene extra Schaumstoffpolster für den Wadenbereich und den plantaren Fußbereich eine individuelle, druckumverteilende und sichere Anlage des Produktes.

Positionierungskeil



Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Positionierungskeil kann einer Hüftrotation entgegengewirkt werden.

Therapiegerecht individuell anpassbar

Der Body Armor® Heel Reliever kann ohne großen Aufwand individuell an jeden Patientenfuß zur gezielten Druckentlastung und stabilen Positionierung angepasst werden.



Mithilfe der Body Armor® Heel Reliever Fersen-Freilagerung wird der Druck an der Ferse auf die Achillessehne und den Gastrosoleuskomplex an der Wade verlagert.

Der Fersenbereich wird vollständig von sämtlichem Auflagedruck befreit. Die Ferse „schwebt“ frei.



Einheitsgröße



Rechts = Links



Für Diabetiker



Geringes Gewicht



Zeitersparnis



Waschbar bei 60°


Artikelliste

Body Armor® Heel Reliever

Farbe: Grau-Blau

Größe: Universal (25 - 54 cm Wadenumfang, bis Schuhgröße 47)

Universell rechts und links tragbar

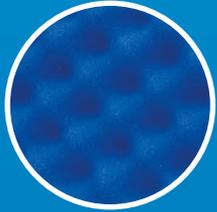


Genoppter Schaumstoff

Durch die genoppte Schaumstoffkonstruktion entsteht eine bessere Luftzirkulation und sorgt so für einen angenehmen Kühleffekt.

ART.-NR.: BAHR-N

PZN 17443730

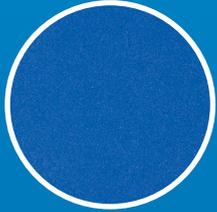

Glatter Schaumstoff

Speziell für empfindliche Haut wurde die glatte Schaumstoffversion entwickelt. Besonders geeignet ist sie für Diabetespatienten. Einer Ödembildung wird so entgegengewirkt.

ART.-NR.: BAHR-F

PZN 17443724

Im Lieferumfang enthalten



Vorfußpolster



Positionierungskeil



Zusätzliches Schaumstoffpolster



Wäschebeutel

Der Body Armor® Heel Reliever kann im mitgelieferten Wäschebeutel bei 60° C gewaschen werden.



Produktvideo

