

DARCO Posterior Splint Fix & DARCO Posterior Splint Plus Fix Fußlagerungsorthesen

Innovative Orthesen zur Immobilisierung in definierter Position



DARCO Posterior Splint Plus Fix

NEU:
Verbesserte Qualität
der Gurtbänder

HiMi-Nr. 23.03.01.0024
(gilt für beide Orthesen)



DARCO Posterior Splint Fix

Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- > Achillessehnenriss
- > Prä- und postoperative Lagerung
- > Posttraumatische Stabilisierung/Ruhigstellung
- > Konservative Lagerung
- > Immobilisierung nach Unfall
- > Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)



DARCO

Beim postoperativen Einsatz direkt im OP-Saal entfällt lästiges Gipsen oder das Erwärmen und Anmodellieren einer Schiene. **Dadurch verkürzt sich die kostenintensive OP-Zeit deutlich!**



Positionierung des Fußes in der Orthese.



Anlegen und zirkuläres Schließen der Gurtbänder im Wadenbereich der Orthese.



Zirkuläres Anlegen des schmalen Gurtbandes um den Vorfuß.



Das Gurtmaterial haftet an den Klettbindern an der Außenseite der Kunststoffschale.

Anlagemöglichkeiten der Gurtbänder



Anlage der drei Gurtbänder zirkulär um den Wadenbereich sowie um den Vorfuß.



Die schmalen Gurte können mit dem Klettverschluss verbunden werden. Das lange Band wird dann im Vorfußbereich befestigt und diagonal im Sprunggelenksbereich geschlossen.

Eigenschaften

- > Für Achillessehnenpathologien in 20° Spitzfußstellung
- > Optimale Positionierung in definierter Position mit:
 - 3 flexibel positionierbaren Gurtbändern (im Lieferumfang enthalten) oder
 - Herkömmlichen Mullbinden durch eingearbeitete Klettstreifen auf der Außenseite

- > Weiche und abwischbare Innenpolsterung (PE-Schaum)
- > Anatomisch optimierte Passform → Vermeidung von Druckstellen
- > Dauerhaft formstabil
- > Universell rechts und links tragbar



Features der DARCO Posterior Splint Plus Fix

Version mit moderater Winkelstellung (90° Plus)

- > Zwei ovale Aussparungen sorgen für eine gute Luftzirkulation
- > Anatomisch großvolumige Fersenform zur Vermeidung von Druckstellen



DARCO Posterior Splint Plus Fix

Fußlagerungsorthese

HiMi-Nr. 23.03.01.0024



GRÖSSE	FUSSLÄNGE DER SCHIENE	WADENLÄNGE DER SCHIENE	ART.-NR	PZN
--------	-----------------------	------------------------	---------	-----

Farbe: Weiß-Blau

S	26,5 cm	34,0 cm	PSF1-90-P	17916909
M	29,5 cm	37,0 cm	PSF2-90-P	17916915
L	32,5 cm	40,0 cm	PSF3-90-P	17916921



Inkl. einem speziellen Saugvlies gegen Wundsekret nach den ersten Post-OP-Tagen



DARCO Posterior Splint Fix

Fußlagerungsorthese

HiMi-Nr. 23.03.01.0024



GRÖSSE	FUSSLÄNGE DER SCHIENE	WADENLÄNGE DER SCHIENE	ART.-NR	PZN
--------	-----------------------	------------------------	---------	-----

Farbe: Weiß-Blau

S	26,5 cm	34,0 cm	PSF1-110	17916938
M	29,5 cm	37,0 cm	PSF2-110	17916944
L	32,5 cm	40,0 cm	PSF3-110	17916973



Inkl. einem speziellen Saugvlies gegen Wundsekret nach den ersten Post-OP-Tagen