

Relief Insert® Walker 2.0 / Achill

Unterschenkel-Fußorthese / mit Achillessehnenentlastung

Ein Produkt - viele Anwendungsmöglichkeiten: Lagerungsschiene, Walker und Achilles-Walker in einem



NEU:

PegContour® Insole Uni
im Relief Insert® Walker 2.0



DARCO

Anwendung 1

Lagerungsschiene | Relief Insert® 2.0

Die Lagerungsschiene dient der Positionierung des Unterschenkels zum Fuß im 90° Winkel. Zur individuellen Spitzfußprophylaxe können die DAW Fersenkeile verwendet werden, um einen vollflächigen Kontakt zum Fuß erhalten.

- > Spitzfußprophylaxe
- > Konservativer und postoperativer Schutz der verletzten Strukturen



Lagerungsschiene kombinierbar mit grauer EVA Innensohle oder PegContour® Insole Uni



Waden-Schiene mit Waden-Liner (waschbar)



Front-Schiene mit Front-Liner (waschbar)

Air-Liner mit Luftkammern

Automatische Weitenregulierung: Regler bei Bedarf zum Aushaken

Umlenkschlaufen

Pumpe

Ventil

Optionaler Vorfußgurt (waschbar)

Austauschbare Innensohle



Anwendung 2

Unterschenkel-Fußorthese | Relief Insert® Walker 2.0

Durch das Anlegen des Fußteilentlastungsschuhs Relief Dual® Plus wird die Lagerungsschiene zu einer mobilisierenden Unterschenkel-Fußorthese. Der Relief Insert® Walker 2.0 kann zur zusätzlichen plantaren Druckentlastung mit verschiedensten DARCO Weichbettungssohlen angepasst werden. Durch die bereits im Walker eingelegte PegContour® Insole Uni – eine Waben-Weichbettungseinlage mit Fersenkontur und Memory-Foam-Effekt – wird eine optimale Druckumverteilung erreicht. Die einzeln herausnehmbaren Waben (Pegs) erlauben eine individuelle Anpassung und ermöglichen eine punktuelle Druckentlastung.

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.0070

Indikationen

- > Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fußoder Knöchelfrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen
- > Postoperativ nach Weberfrakturen
- > Bei Bandrupturen am Sprunggelenk
- > OSG Arthrodesen
- > Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen (bei intakter Achillessehne)
- > TMT 1 Arthrodesen (Lapidusarthrodesen)
- > Nach Metatarsalfaktur-Operationen
- > Nach Hallux Valgus-Operationen
- > Nach Hallux Rigidus-Operationen
- > Nach Hammer- und Krallenzehen-Operationen
- > Frakturen der Phalangen
- > Nach Rückfußoperationen

Im Lieferumfang enthalten

- > Relief Insert® 2.0 Lagerungsschiene
- > Relief Dual® Plus Fußteilentlastungsschuh
- > Optionaler Vorfußgurt
- > PegContour® Insole Uni (bereits im Walker eingelegt)
- > Graue EVA Innensohle (zusätzlich beiliegend)



Relief Insert® 2.0
Lagerungsschiene

PegContour® Insole Uni
Universelle Waben-
Weichbettungseinlegesohle

Relief Dual® Plus
Fußteilentlastungsschuh

Anwendung 3

Achilles-Walker | Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Der Relief Insert® Walker 2.0 Achill ist eine Unterschenkel-Fußorthese mit 3-teiligem Keil-Set zur Achillessehnenentlastung. Die Erhöhung und der Spitzfußwinkel kann durch Variieren der angewendeten Keile auf den Patienten angepasst werden. 3 Keile entsprechen 120°. Eine schrittweise Entnahme der Keile ermöglicht den Spitzfußwinkel dem Therapieverlauf anzupassen. Der offene und weiche Fersenbereich gewährleistet eine gute Luftzirkulation und wirkt sich positiv auf die Wundheilung aus.

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.1021

Indikationen

- > Achillessehnenrupturen
- > Postoperativ bei:
 - Achillessehnnah
 - Haglundexostosen-Abtragungen

Im Lieferumfang enthalten

- > Relief Insert® 2.0 Lagerungsschiene
- > Relief Dual® Plus Fußteilentlastungsschuh
- > Optionaler Vorfußgurt
- > DAW (DARCO Achilles Wedges) Fersenkeile
- > Graue EVA Innensohle (bereits im Walker eingelegt)



Relief Insert® 2.0
Lagerungsschiene

Relief Dual® Plus
Fußteilentlastungsschuh

DAW (DARCO Achilles Wedges)
Fersenkeile



Vorteile und Eigenschaften

Vorteile

- > 3-in-1: Durch einzelne, abnehmbare Elemente kann das Produkt in vielen Bereichen angewandt werden:
 1. Als Lagerungsschiene z. B. bereits im OP
 2. Mit dem Futeilentlastungsschuh Relief Dual® Plus als Unterschenkel-Fußorthese
 3. Mit den DAW Fersenkeilen (3-teiliges Kit) als Achilles-Walker zur Achillessehnenentlastung
- > Einfache Wundkontrolle durch leichtes Abnehmen und wieder Anlegen
- > Zusätzlicher Halt durch optionalen Vorfußgurt (inklusive)
- > Hohe Patientenakzeptanz
 - Weicher Fersenbereich durch Aussparung der Schiene
 - Schlankes Design
 - Geringes Gewicht
 - Hygienisch durch Abnehmen des Schuhs und auswechselbares, bei 60° C in der Maschine waschbares Lining
 - Geringe Wärmeentwicklung

Eigenschaften

- > Zur postoperativen Mobilisierung sowie Lagerung
- > Physiologisches, sicheres Gangbild
- > Nachhaltiges Therapiekonzept in Verbindung mit dem Futeilentlastungsschuh Relief Dual® Plus
- > Universell rechts und links tragbar
- > Austauschbare Innensohle

 Rechts = Links

 Geringes Gewicht

 Austauschbare Innensohle


Maximale Stabilität durch individuelle Anpassung

Integrierte Pumpe

Für eine Stabilisierung im Sprunggelenksbereich kann das Volumen der Luftkammern erhöht und somit individuell angepasst werden. Ein Reduzieren der Luft ist durch Betätigen des Ventils möglich.

Automatische Weitenregulierung

Durch die innovative Schalentechnik stellt sich die Orthese automatisch auf den Wadenumfang des Patienten ein. Die daraus resultierende Weichteilkompression erzeugt eine zusätzliche Stabilität im Unterschenkel-Fuß-Bereich. Bei besonders kräftigen Waden kann der Regler zudem ausgehakt werden.

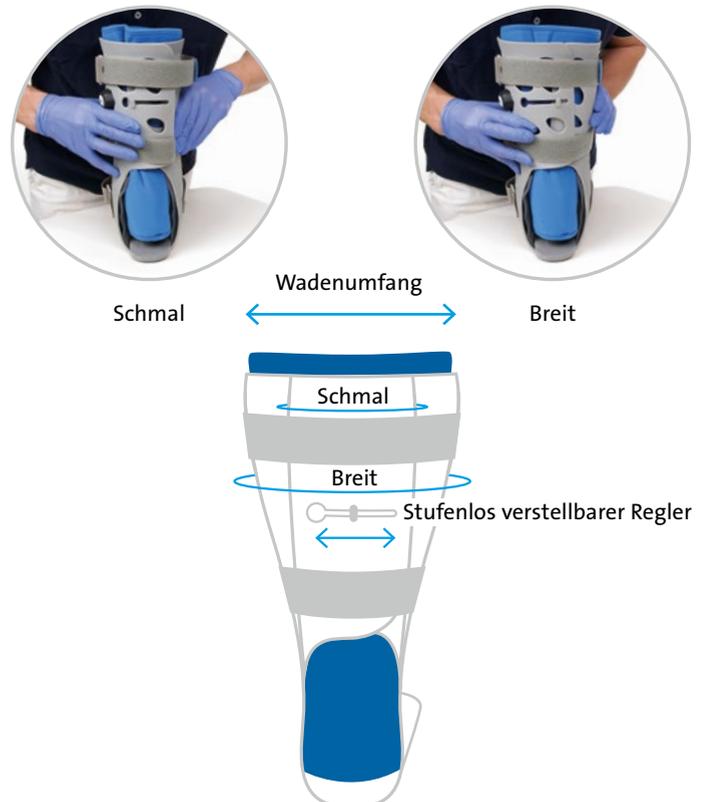

Artikelliste



Relief Insert® Walker 2.0
Unterschenkel-Fußorthese
HiMi-Nr. 23.06.01.0070

GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
Farbe: Grau-Blau		
XS 37,0 – 38,5	RIW2-0	18090274
S 39,0 – 41,0	RIW2-1	18090251
M 41,5 – 43,0	RIW2-2	18090245
L 43,5 – 45,0	RIW2-3	18090216
XL 45,5 – 47,0	RIW2-4	18090268



Relief Insert® Walker 2.0 Achill
Achilles-Walker
HiMi-Nr. 23.06.01.1021

GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
Farbe: Grau-Blau		
XS 37,0 – 38,5	RIW2W-0	18090328
S 39,0 – 41,0	RIW2W-1	18090305
M 41,5 – 43,0	RIW2W-2	18090297
L 43,5 – 45,0	RIW2W-3	18090280
XL 45,5 – 47,0	RIW2W-4	18090311

Kombiprodukte



DAW (DARCO Achilles Wedges)
Fersenkeile für Walker

GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
Farbe: Schwarz		
Universal	DAW	18090179



TwinShoe®
Höhenausgleichsschuh
HiMi-Nr. 31.03.03.8001

GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
Farbe: Schwarz		
XS 33,5 – 37,0	TS0B	16629473
S 37,5 – 39,5	TS1B	16629496
M 40,0 – 41,5	TS2B	16629504
L 42,0 – 44,0	TS3B	16629510
XL 44,5 – 47,0	TS4B	16629527

Sohlensysteme



PegAssist® Insole



PegContour® Insole



Relief Contour Insole



Puzzle Insole®



PegContour® Insole Uni



Toe Cap Zehenkappe

Größen und Maße



XS 37–38,5
Innensohle und
Zehenkappe = WM



S 39–41
Innensohle und
Zehenkappe = MS



M 41,5–43
Innensohle und
Zehenkappe = MM



L 43,5–45
Innensohle und
Zehenkappe = ML



XL 45,5–47
Innensohle und
Zehenkappe = MXL

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.

