

Décharge ciblée de la pression avec les semelles intérieures de DARCO

4 semelles spéciales – de nombreuses possibilités d'utilisation

Tous les systèmes de semelle DARCO d'un seul coup d'oeil



Relief Contour Insole

PegAssist® Insole

PegContour® Insole Uni

Puzzle Insole®



DARCO

Relief Contour Insole

Semelle voûte plantaire coussinée

Droite ≠ Gauche

D ≠ G

Pour les diabétiques

+

Gain de temps

✓



Répartition parfaite de la pression jusqu'à 90 % par contact quasiment intégral

La Relief Contour Insole est une semelle de garniture souple continue. Grâce aux contours adaptés à l'anatomie, une répartition de pression de près de 90 % est atteinte. La courbure longitudinale médiane et latérale ainsi que la courbure transversale proximale garantissent une répartition des charges idéale. Les pointes de pression élevées sont entièrement évitées. Le matériau de PU possède une reprise élastique élevée. Grâce au talon négatif, une extension dorsale de 2,4° est générée, de sorte qu'une décharge de l'avant-pied est obtenue. Une couche de protection agréable en jersey et en lycra augmente le confort de port.

INDICATIONS

- > Après une opération de l'hallux valgus et des petits orteils (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
- > Pied plat, valgus, étalé
- > Modifications du pied d'origine angio-neuropathique associées à de légères déformations du pied

CARACTÉRISTIQUES

- > Semelle voûte plantaire coussinée (longue)
- > Contours adaptés à l'anatomie
 - Répartition optimale de la pression
- > Contact de quasiment toute la surface du pied avec la semelle
 - Répartition de la pression pouvant atteindre 90 %
- > Extension dorsale : Talon négatif de 2,4°
 - Décharge de l'avant-pied
- > Courbure longitudinale médiane et courbure transversale proximale
 - Répartition idéale de la charge
- > Matériau PU abrasif à haute élasticité
- > Revêtement de la semelle souple et à élasticité longitudinale et transversale
 - Confort de port élevé
- > Hauteur pour la taille MM :
 - 12 mm à l'arrière-pied
 - 16 mm à l'avant-pied
- > Square Toe : Forme carrée généreuse
 - Protection des orteils



PegAssist® Insole

Semelle de décharge alvéolée

Droite = Gauche

D=G

Pour les diabétiques

+

Poids plume

☁

Gain de temps

⌚



Relief Dual® / Plus

PegAssist® Insole
(MTP II + III omis)
dans la Relief Dual® / Plus



Réduction de pression ponctuelle grâce à des zones de décharge individuelles

La PegAssist® Insole sert à la réduction de pression plantaire ciblée (jusqu'à 50 %) et s'utilise de préférence dans les cas aigus, idéale pour les soins du DFS. Un retrait simple de certaines cellules de nid d'abeille permet la décharge ponctuelle. Une couche de protection mince fixe la partie traitée et empêche un glissement des cellules de nid d'abeille adjacentes. Grâce à la combinaison d'une couche de mousse de PE de 18 mm, de Poron® et d'EVA, une réduction de pression parfaite est atteinte.

INDICATIONS

Pour une répartition ciblée de la pression en cas de :

- > Lésions plantaires
- > Ulcères plantaires
- > Zones d'hyperpression


CARACTÉRISTIQUES

- > Système de semelle avec alvéoles (pegs) amovibles individuellement
 - Ajustement individuel
- > Divers coloris
 - Caractéristiques identiques, mais ajustement différent :
 - Semelle bleue : 7 Tailles (WS, WM, WL, MS, MM, ML, MXL)
 - Semelle noire : 5 Tailles (XS, S, M, L, XL)
- > Répartition de la pression plantaire
- > Décharge ciblée et ponctuelle de la pression
- > Réduction de la pression jusqu'à 50 %
- > Absorption des chocs
- > Matériel : Couche de mousse PE de 18 mm + Poron® + EVA
- > Square Toe : Forme carrée généreuse
 - Protection des orteils
- > Marqueur (inclus)




PegContour® Insole Uni

Semelle universelle alvéolée à rembourrage souple

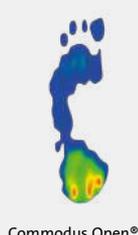

Commodus Open®

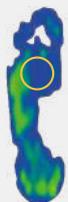

PegContour® Insole Uni
(MTP II + III omis)
dans la Commodus Open®



AllRound Shoe®



PegContour® Insole Uni
(Talon omis)
dans la AllRound Shoe®

Décharge ciblée de la pression et répartition de la pression sur toute la surface

La semelle PegContour® Insole Uni est un système efficace de semelles tridimensionnelles pour la redistribution de la pression plantaire. Le contour adapté du talon et la mousse à mémoire de forme permettent une redistribution optimale de la pression. Le retrait facile des alvéoles (pegs) individuelles permet un soulagement ciblé. La pression est réduite jusqu'à 45 %. Étant symétrique, cette semelle peut se porter universellement à gauche et à droite et être utilisée en cas de lésions au niveau de la voûte plantaire.



**NOUVELLE
VERSION**
de la semelle
bleue et grise

La nouvelle version
apporte plusieurs avantages :

- + Méthode de production modifiée
→ Aucun plancher de semelle EVA nécessaire
- + Personnalisation plus facile et plus rapide
- + Composition optimisée des matériaux PU
→ Résilience idéale
- + Nouvelle doublure de semelle intérieure et nouveau design de couleur
- + Fabriqué en Europe



La symétrie permet aux semelles d'être portées universellement à gauche et à droite.

Droite = Gauche

D=G


Pour les diabétiques

+


Gain de temps

✓

Disponible
également
en taille
MXXL
(47,5 - 50,0) !

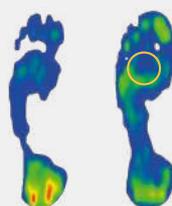

Relief Dual® / Plus PegContour® Insole Uni
(MTP II + III omis)
dans la Relief Dual® / Plus

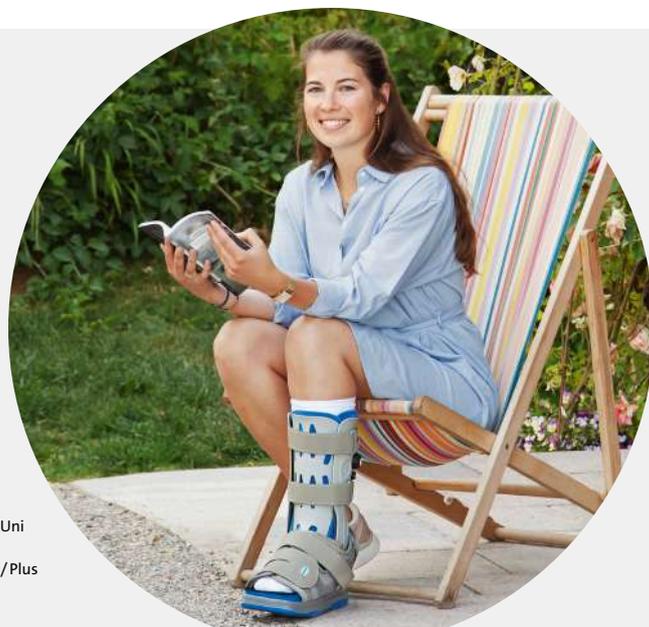

INDICATIONS


- > Après une opération de l'hallux valgus et des petits orteils (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
- > Utilisations et prises en charge post-opératoires au niveau du talon
- > Modifications du pied d'origine angio-neuropathique associées à de légères déformations du pied
- > Cicatrisation des ulcères au niveau du talon (ulcères de l'arrière-pied)
- > Fasciite plantaire / épine calcanéenne
- > Plaies au talon

Répartition ciblée de la pression en cas de :

- > Lésions plantaires
- > Ulcères plantaires / prévention des ulcères
- > Zones d'hyperpression

CARACTÉRISTIQUES

- > Semelle à rembourrage souple (semelle longue), amortissante, avec alvéoles (pegs) amovibles individuellement
→ Ajustement individuel
- > Répartition de la pression plantaire + décharge de pression ponctuelle ciblée
- > Réduction de la pression jusqu'à 45 %
- > Matériau PU abrasif à haute élasticité
- > Revêtement de semelle souple en polyester à élasticité longitudinale et transversale
→ Confort de port élevé
- > Semelle symétrique
→ Peut se porter de façon universelle à droite + à gauche
- > Lésions de la voûte plantaire
- > Contours adaptés à l'anatomie
→ Répartition optimale de la pression

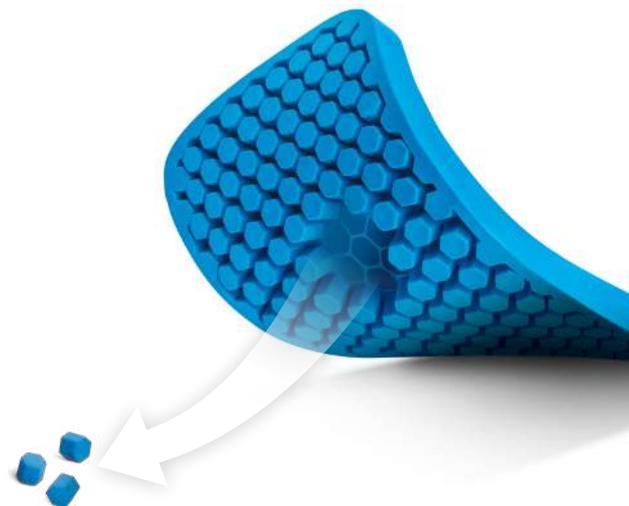

Puzzle Insole®

Semelle de décharge modulable


Droite = Gauche

D=G

Poids plume



Gain de temps

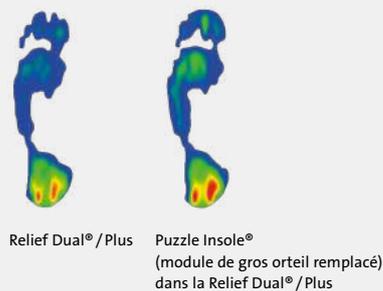

En faire une avec deux – pour une adaptation individuelle!

Décharge de pression sur indication par semelle intérieure modulaire avec éléments interchangeables

Le remplacement simple des modules permet une répartition de la pression spécifique au patient et dépendant de l'indication. Grâce au talon négatif de 2,4°, une décharge supplémentaire est obtenue dans l'avant-pied. Dans la partie à décharger, le module EVA noir respectif (30 Shore) est remplacé par l'élément EVA bleu plus souple (9 Shore).

INDICATIONS

- 1 Module pour petits orteils (étroit)**
 - > Bunionette (Digitus Superductus)
 - > Fracture de Jones (le module Puzzle va jusqu'à la série d'articulations Lisfranc)
- 2 Module médian**
 - > Ostéotomie de Weil et / ou de Helal I - IV
 - > Névrome de Morton
 - > Correction des orteils en marteau
 - > Arthrodèse PIP / DIP
 - > Fractures de l'os métatarsien II – IV
 - > Ostéotomie de raccourcissement des os métatarsiens II - IV (module Puzzle allant jusqu'à extrémité proximale des métatarses II - IV)
- 3 Module de gros orteil (large)**
 - > Arthrodèse MPG et GZGG
 - > Ostéotomie d'Austin, Scarf et Akin
 - > Closing et Opening Wedge
 - > Ostéotomie transversale et pendulaire
 - > Arthrodèse de Lapidus (arthrodèse TMT1)
 - > Ostéotomie de Youngswick (module Puzzle allant jusqu'à Cuneiforme I)



CARACTÉRISTIQUES

- > Lot de 2 semelles (Noire + Bleu) avec chacune 4 éléments
 - Possibilité de combinaison individuelle
- > Différentes duretés Shore : Bleu 09 | Noir 30
- > Composition différente des modules de semelles
 - Répartition de la pression selon l'indication
- > Extension dorsale : Talon négatif de 2,4°
 - Décharge de l'avant-pied
- > Répartition de la pression plantaire
- > Absorption des chocs
- > Matériel : Mousse EVA
- > Square Toe : Forme carrée généreuse
 - Protection des orteils





Les cas aigus affectant le pied exigent une prise en charge rapide avec le système de semelle adéquat. Qu'il s'agisse d'une solution provisoire ou d'une prise en charge définitive à l'aide de semelles pour pied diabétique, celle-ci doit être correcte d'un point de vue orthopédique. Nous offrons une combinaison sur mesure pour ces deux domaines d'application : les chaussures thérapeutiques du programme DARCO, complétées par des semelles intérieures spéciales.

Produits compatibles

		Relief Contour Insole	PegContour® Insole	PegAssist® Insole	Insole Uni	Puzzle Insole®
MedSurg Chaussure postopératoire		✓	✓	✓	✓	✓
MedSurg Pro® Chaussure postopératoire		✓	✓	✓	✓	✓
AllRound Shoe® Chaussure fermée de pansement					✓	
Commodus Open® Chaussure ouverte de pansement				✓	✓	
Relief Dual® Chaussure de décharge partielle du pied		✓	✓	✓	✓	✓
Relief Dual® Plus Chaussure de décharge partielle du pied à tige haute		✓	✓	✓	✓	✓
OrthoWedge Chaussure de décharge de l'avant-pied				✓	✓	
OrthoWedge Light Chaussure de décharge de l'avant-pied				✓	✓	
HeelWedge® Chaussure de décharge du talon				✓	✓	
SlimLine® Botte pour plâtre				✓	✓	
Relief Insert® Walker 2.0 Orthèse de jambe-pied		✓	✓	✓	✓	✓

Liste des articles

TAILLES RÉF. RÉF.



Relief Contour Insole

Pour MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Femmes	Droite	Gauche
WS 34,0 – 36,5	RC-W1-R	RC-W1-L
WM 37,0 – 38,5	RC-W2-R	RC-W2-L
WL 39,0 – 41,0	RC-W3-R	RC-W3-L

Hommes

MS 39,0 – 41,0	RC-M1-R	RC-M1-L
MM 41,5 – 43,0	RC-M2-R	RC-M2-L
ML 43,5 – 45,0	RC-M3-R	RC-M3-L
MXL 45,5 – 47,0	RC-M4-R	RC-M4-L



PegAssist® Insole

Pour MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Femmes	
WS 34,0 – 36,5	PAS-W1
WM 37,0 – 38,5	PAS-W2
WL 39,0 – 41,0	PAS-W3

Hommes

MS 39,0 – 41,0	PAS-M1
MM 41,5 – 43,0	PAS-M2
ML 43,5 – 45,0	PAS-M3
MXL 45,5 – 47,0	PAS-M4



Pour OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, Commodus Open®, SlimLine®

XS 33,5 – 37,0	PAS0
S 37,5 – 39,5	PAS1
M 40,0 – 41,5	PAS2
L 42,0 – 44,0	PAS3
XL 44,5 – 47,0	PAS4



Puzzle Insole®

Pour MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Femmes	
WS 34,0 – 36,5	PI-WS
WM 37,0 – 38,5	PI-WM
WL 39,0 – 41,0	PI-WL

Hommes

MS 39,0 – 41,0	PI-MS
MM 41,5 – 43,0	PI-MM
ML 43,5 – 45,0	PI-ML
MXL 45,5 – 47,0	PI-MXL

TAILLES RÉF.



PegContour® Insole Uni

Pour MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®, Relief Dual® Plus, Relief Insert® Walker 2.0

Femmes	
WS 34,0 – 36,5	PCIU-W1
WM 37,0 – 38,5	PCIU-W2
WL 39,0 – 41,0	PCIU-W3

Hommes

MS 39,0 – 41,0	PCIU-M1
MM 41,5 – 43,0	PCIU-M2
ML 43,5 – 45,0	PCIU-M3
MXL 45,5 – 47,0	PCIU-M4
MXXL 47,5 – 50,0	PCIU-M5



Pour OrthoWedge, OrthoWedge Light, HeelWedge®, Commodus Open®, SlimLine®

XS 33,5 – 37,0	PCIU0
S 37,5 – 39,5	PCIU1
M 40,0 – 41,5	PCIU2
L 42,0 – 44,0	PCIU3
XL 44,5 – 47,0	PCIU4



Pour AllRound Shoe®

XS 37,0 – 38,0	PCIU-ARS0
S 39,0 – 40,0	PCIU-ARS1
M 41,0 – 42,0	PCIU-ARS2
L 43,0 – 44,0	PCIU-ARS3
XL 45,0 – 46,0	PCIU-ARS4
XXL 47,0 – 48,0	PCIU-ARS5



Vidéos de produit

