

# Body Armor® Heel Reliever


## Fersen-Freilagerung


Effektive Druckentlastung für Liegendpatienten




Einfaches Anlegen	Anpassungsmöglichkeiten	Vermeidung von Hüftaußenrotation	
 <p>Die Ferse direkt über der Fersenöffnung plazieren.</p>	 <p>Bei <b>Fallfuß</b> Schaumstoffpolster senkrecht hinter der Fußsohle anbringen.</p>	 <b>Linkes Bein</b>  <p>1 Umlenkschlaufen des Keils und der Freilagerung rechts verbinden.</p>	 <b>Rechtes Bein</b>  <p>1 Klettbänder durch die Umlenkschlaufen des Keils führen.</p>
 <p>Klettbänder durch die Umlenkschlaufen führen und schließen.</p>	 <p>Bei <b>Fußknöchel Geschwür</b> Teile des fixierten Wadepolsters im Knöchelbereich entfernen.</p>	 <p>2 Klettbänder durch die Umlenkschleife führen und schließen. Dann Positionierungskeil nach links klappen.</p>	 <p>2 Klettbänder durch die Umlenkschleife führen und schließen. Dann Positionierungskeil von links nach rechts klappen.</p>
 <p>Fersenöffnung ermöglicht Kontrolle der korrekten Position.</p>	 <p>Bei <b>bariatrischen Beinen</b> für mehr Polsterung das zusätzliche Schaumstoffpolster verwenden.</p>	 <p>3 Fertige Anlage.</p>	 <p>3 Fertige Anlage.</p>
 <p>Die Ferse soll 1 Finger breit „schweben“.</p>	 <p>Bei <b>kleinen Beinumfangen</b> seitlich Teile des fixierten Wadepolsters entfernen.</p>		
 <p>Auch bei Vakuumtherapie</p>	 <p>Bei <b>Achillessehnen Beschwerden</b>: Achillessehne V-förmig aussparen.</p>		

### Schaumstoffvarianten

 **Genoppt** für bessere Luftzirkulation

 **Glatt** speziell für empfindliche Haut

 Zusätzliches **Schaumstoffpolster**

 Reinigung bei 60° Maschinenwäsche im mitgelieferten Waschbeutel



HiMi-Nr. 11.11.05.0040 (genoppt)  
HiMi-Nr. 11.11.05.0041 (glatt)

### Vorsicht

- > Produkt ist nicht zum Gehen geeignet
- > Produkt nicht direkt auf der Haut tragen
- > Kontrolle auf Hautveränderung alle 6-8 Stunden durchführen
- > Anwendung nur an 1 Patienten

### Größe (One-Size-Fits-All)

- > Universalgröße
- > bis Schuhgröße 47
- > 25–54 cm Wadenumfang
- > rechts und links tragbar

QR-Code zum Produktvideo



Weitere Produktinformationen finden Sie auf:

 [www.darco.de](http://www.darco.de)

# DARCO