

Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Unterschenkel-Fußorthese mit Achillessehnenentlastung


Coming soon!



Relief Insert® 2.0
Lagerungsschiene



DAW (DARCO Achilles Wedges)
Fersenkeile

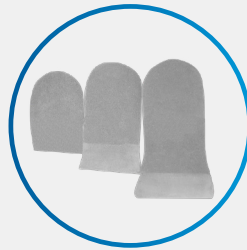

Relief Dual® Plus
Fußteilentlastungsschuh
mit hohem Schaft



Die Unterschenkel-Fußorthese besteht aus folgenden Komponenten:

- > Lagerungsschiene: Relief Insert® 2.0 mit Air-Liner und integrierter Pumpe
- > Fersenkeile (DAW | DARCO Achilles Wedges)
- > Fußteilentlastungsschuh mit hohem Schaft: Relief Dual® Plus

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.1021



DARCO



Die DAW Fersenkeile bestehen aus 3 Keilen in verschiedenen Längen. Ein Keil hat eine Höhe von ca. 11 mm. Je nach Anzahl der angewendeten Keile variiert die Erhöhung und der Spitzfußwinkel kann so individuell eingestellt werden.

Entsprechend der Fußlänge und dem gewünschten Spitzfußwinkel werden die Keile übereinandergelegt und im Fersenbereich des Walkers fixiert.

Je nach Therapieverlauf können Schritt für Schritt die Keile entnommen und so die Höhe angepasst werden. Die Keile sind in einer Einheitsgröße erhältlich und sind somit universell für alle Größen des Walkers einsetzbar. Sie können rechts und links eingesetzt werden.

Indikationen

- > Achillessehnenrupturen
- > Postoperativ bei Achillessehnennaht
- > Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen

Kontraindikationen:

- > Vorfußbeschwerden
- > Plantare Fußulzerationen

Eigenschaften


- > Einfaches An- und Ablegen
- > Hygienisch durch Abnehmen des Schuhs und auswechselbares Lining
- > Zur postoperativen Mobilisierung sowie Lagerung für 4 – 6 Wochen
- > Physiologisches, sicheres Gangbild
- > Nachhaltiges Therapiekonzept in Verbindung mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual® Plus
- > Universell rechts und links tragbar

Reinigung

Schuh, Schiene, graue Innensohle und Keile können bei leichter Verschmutzung mit einem feuchten Lappen abgewischt oder mit handelsüblichem Desinfektionsmittel gereinigt werden. Die blauen Lining-Elemente (Waden-, Front-Liner und Vorfußgurt) können aus der Schiene entnommen und bei 60° C in der Maschine gewaschen werden.

Größen und Maße

Die Unterschenkel-Fußorthese ist in fünf Größen erhältlich und universell rechts und links tragbar.

	GRÖSSE	ART.-NR.
	Relief Insert® Walker 2.0 Achill	
	Farbe: Grau-Blau	
	XS 37,0 – 38,5	RIW2W-0
	S 39,0 – 41,0	RIW2W-1
	M 41,5 – 43,0	RIW2W-2
	L 43,5 – 45,0	RIW2W-3
	XL 45,5 – 47,0	RIW2W-4

Kompatibel mit

 Toe Cap Zehenkappe