

# PegContour® Insole Uni

## Waben-Weichbettungseinlegesohle

Das universell rechts und links einsetzbare Einlagensystem zur vollflächigen Druckumverteilung sowie zur punktuellen Druckentlastung



Die PegContour® Insole Uni aus 100 %-igem PU-Material bietet durch die angepasste Fersenkontur und den Memory-Schaum eine optimale Druckumverteilung. Der längs- und querelastische Sohlenbezug sorgt für einen hohen Tragekomfort. Das einfache Herausnehmen einzelner Waben erlaubt eine punktuelle Entlastung.

Da diese Sohle eine Symmetrie vorweist, ist sie universell rechts und links tragbar und auch bei Läsionen im Fußgewölbe einsetzbar.

Abrechnungsvorschlag:  
31.99.99.0999 (Sonderarbeiten nach Kostenvoranschlag bei Verbandsschuhen)



**DARCO**



Nachdem Sie den zu entlastenden Bereich bestimmt haben (Bild 1), entfernen Sie die Waben (Pegs) an der Stelle, an der die Druckentlastung stattfinden soll (Bild 2, 3). Im Anschluss werden die Pegs mit Hilfe des mitgelieferten Sohlenbodens, welcher auf die Sohle geklebt wird fixiert, um ein Verrutschen der angrenzenden Waben zu verhindern (Bild 4). Nun kann die PegContour® Insole Uni in den passenden Therapieschuh gelegt werden. Der Druck wird bis zu 45 % reduziert.

#### INDIKATIONEN

- > nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- > Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten
- > Abheilung von Ulcera im Fersenbereich (Rückfußulcera)
- > Fersensporn (plantare Fasciitis)
- > Fersenwunden
- > postoperative Anwendungen und Versorgungen an der Ferse

#### Zur gezielten Druckumverteilung bei:


- > plantaren Läsionen
- > plantaren Ulcera / Ulcus-Prävention
- > Hyperpressionsstellen

#### EIGENSCHAFTEN

- > weicher, längs- und querelastischer Sohlenbezug aus funktionellem Polyester
- > beschleifbares PU-Material (Memory-Schaum)
- > individuelle Anpassung durch einzeln herausnehmbare Waben (Pegs)
- > rechts und links tragbar

#### WIRKUNGSWEISEN

- > effektives Einlagensystem zur plantaren Druckentlastung bei akuten Versorgungen
- > Druckreduzierung bis zu 45 % möglich
- > punktuelle Druckentlastung
- > durch eine angepasste Fersenkontur und den Memory-Schaum wird eine optimale Druckumverteilung erreicht

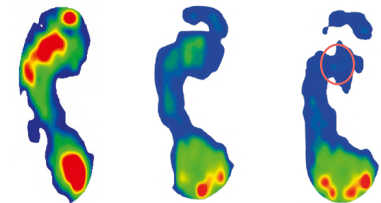

Neutralmessung Commodus Open® PegContour® Insole Uni im Commodus Open® (MTP II + III ausgespart)



OrthoWedge

OrthoWedge Light


HeelWedge®

Commodus Open®

SlimLine®

Die PegContour® Insole Uni ist mit allen abgebildeten Schuhmodellen kompatibel.

#### GRÖSSEN UND MASSE

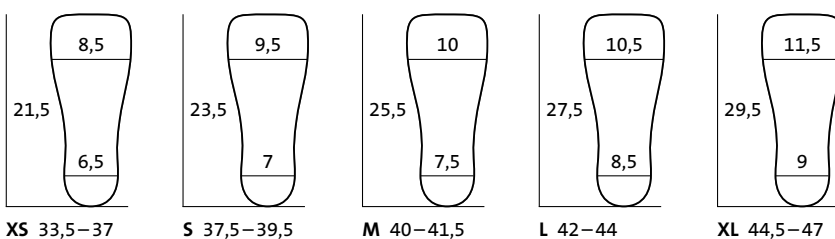

GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
XS 33,5 – 37,0	PCIU0	17531859
S 37,5 – 39,5	PCIU1	17531865
M 40,0 – 41,5	PCIU2	17531871
L 42,0 – 44,0	PCIU3	17531888
XL 44,5 – 47,0	PCIU4	17531902