

# DARCO Posterior Splint Fix

Innovative Fußlagerungsschale für viele Versorgungsgebiete

Neu!



Die DARCO Posterior Splint Fix besteht aus einer festen Kunststoffschale. Zwei flexibel positionierbare Gurtbänder fixieren den Fuß optimal in der Orthese.

Die Fußlagerungsschale ist in zwei unterschiedlichen Winkelneigungen (90° Plus und 110°) erhältlich. Dadurch ist eine individuelle, indikationsentsprechende Lagerung des Patienten möglich.

Die Splint zeichnet sich durch eine anatomisch optimierte Passform und geringes Eigengewicht aus. Dabei ist sie dauerhaft formstabil.

Die weiche Innenpolsterung (PE-Schaumstoff) bietet dem Patienten, auch über eine längere Anwendungsdauer, einen angenehmen Tragekomfort.

Hilfsmittelnummer: 23.03.01.0024



**DARCO**

Die DARCO Posterior Splint Fix ist eine gebrauchsfertige Fußlagerungsohese, die in jeder Versorgungsphase eingesetzt werden kann (auch während radiologischer Untersuchungen).

Im postoperativen Einsatz direkt im OP-Saal entfällt lästiges Gipsen oder das Erwärmen und Anmodellieren einer Schiene. Dadurch verkürzt sich die kostenintensive OP-Zeit deutlich.

Die DARCO Posterior Splint Fix wird nach dem Verbinden der OP-Wunde von posterior angelegt und durch zwei flexibel positionierbare Gurtbänder fixiert.

Eine unkomplizierte Verpackungsweise und dadurch platzsparende Lagerhaltung vervollständigt die Vorteile dieses innovativen Produktes mit einem breiten orthopädischen und unfallchirurgischen Einsatzspektrum für Klinik und Praxis.

Die DARCO Posterior Splint Fix Fußlagerungsohese wurde von renommierten Fuß- und Sprunggelenkschirurgen und Orthopädietechnikermeistern entwickelt und auf die individuellen Bedürfnisse von Patienten und Versorgern angepasst.



Positionierung des Fußes in der Orthese.



Anlegen und zirkuläres Schließen des breiten Gurtbandes um den Wadenbereich der Orthese.



Zirkuläres Anlegen des schmalen Gurtbandes um den Vorfuß.



Das Gurtmaterial haftet an den Klettbandern an der Außenseite der Kunststoffschale.

## Indikationen

Allgemein anwendbar bei konservativer und postoperativer Therapie von Unterschenkel-, Sprunggelenks- und Fußverletzungen:

- > Postoperative Lagerung
- > Posttraumatische Stabilisierung / Ruhigstellung
- > Immobilisierung nach Unfall
- > Kurzfristige Stabilisierung (Bandrupturen, Luxationen, Frakturen, Wunden, Zerrungen, Verstauchungen etc.)
- > Präoperative Lagerung

### 110°-Modelle

- > Achillessehnenriss

Bitte beachten Sie bei der Anwendung der DARCO Posterior Splint Fix, dass diese bei Patienten mit einer auffälligen Wadenmuskelerkürzung oder einer ausgeprägten Haglund- / posterolateralen Exostose evtl. zu Missempfindungen oder Druckstellen führen kann.

## DARCO Posterior Splint Plus Fix

Version mit moderater Winkelstellung (90° Plus)

- > Zwei ovale Aussparungen sorgen für eine gute Luftzirkulation
- > Anatomisch großvolumige Fersenform zur Vermeidung von Druckstellen
- > Inkl. einem speziellen Saugvlies gegen Wundsekret nach den ersten Post-OP-Tagen



GRÖSSE	ART.-NR.	PZN	GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
<b>Farbe: Weiß-Blau</b>					
<b>Winkel 90° Plus</b>					
S	PSF1-90-P	17916909	S	PSF1-110	17916938
M	PSF2-90-P	17916915	M	PSF2-110	17916944
L	PSF3-90-P	17916921	L	PSF3-110	17916973

Die DARCO Posterior Splint Fix inklusive Fixierungs-Gurt-Set ist universell rechts und links tragbar. Sie ist in drei Größen und zwei unterschiedlichen Winkelstellungen erhältlich: Ein Modell für Achillessehnenpathologien in 20° Spitzfußstellung (110°) und die 90° Plus Variante ist speziell für Patienten mit eingeschränkter Dorsalextension im oberen Sprunggelenk.