

# Relief Insert® Walker 2.0

## Unterschenkel-Fußorthese

Lagerungsschiene und Walker in einem



Neu!





# Eigenschaften und Vorteile

## Eigenschaften

- > Zur postoperativen Mobilisierung sowie Lagerung
- > Physiologisches, sicheres Gangbild
- > Nachhaltiges Therapiekonzept in Verbindung mit dem Fußteilentlastungsschuh Relief Dual® Plus
- > Universell rechts und links tragbar

## Vorteile

- > Hygienisch durch Abnehmen des Schuhs und auswechselbares Lining
- > Automatische Weitenregulierung
- > Weicher Fersenbereich durch Aussparung der Schiene
- > Schlankes Design
- > Geringes Gewicht
- > Einfache Wundkontrolle durch leichtes Abnehmen und wieder Anlegen
- > Hohe Patientenakzeptanz
- > Individuell anpassbar durch integrierte Pumpe

## Individuelle Anpassung

### Integrierte Pumpe

Für eine individuelle Anpassung kann mit der seitlich angebrachten Pumpe das Volumen der Luftkammern erhöht und so das Sprunggelenk zusätzlich stabilisiert werden. Um das Volumen zu verringern, kann mit Hilfe des Ventils die Luft wieder abgelassen werden.

### Automatische Weitenregulierung

Die Weite der Lagerungsschiene stellt sich automatisch auf den Wadenumfang des Patienten ein. Im Bedarfsfall kann, bei besonders kräftigen Waden, der Regler ausgehakt werden.

### Austauschbare Innensohle

Falls gewünscht, kann die Lagerungsschiene mit einer anderen kompatiblen DARCO Einlegesohle kombiniert werden.

## Reinigung

Schuh, Schiene und graue Innensohle können bei leichter Verschmutzung mit einem feuchten Lappen abgewischt oder mit handelsüblichem Desinfektionsmittel gereinigt werden. Die blauen Lining-Elemente (Waden-, Front-Liner und Vorfußgurt) können aus der Schiene abgenommen und bei 60° C in der Maschine gewaschen werden.



## Rucksack

Alle Varianten des Relief Insert® Walker 2.0 werden in einem praktischen Rucksack angeliefert. Die Hände bleiben frei, um ein sicheres Gehen mit Gehhilfen zu gewährleisten. Der Rucksack kann, nach abgeschlossener Therapie, auch als modisches Accessoire verwendet werden.

# Anwendung 1

## Lagerungsschiene | Relief Insert® 2.0

Die Lagerungsschiene dient der Positionierung des Unterschenkels zum Fuß im 90° Winkel. Zudem kann aus der Lagerungsschiene mithilfe eines Therapieschuhs ein Walker zusammengestellt werden. Zur individuellen Spitzfußprophylaxe können die DAW Fersenkeile verwendet werden, um einen vollflächigen Kontakt zum Fuß zu erhalten.

- > Spitzfußprophylaxe
- > Konservativer und postoperativer Schutz der verletzten Strukturen



Waden-Schiene mit Waden-Liner (waschbar)

Automatische Weitenregulierung:  
Regler im Bedarfsfall zum Aushaken

Front-Schiene  
mit Front-Liner  
(waschbar)

Umlenkschlaufen

Pumpe


Ventil

Waden-Liner  
(waschbar)

Optionaler Vorfußgurt  
(waschbar)

Air-Liner mit Luftkammern

Austauschbare Innensohle

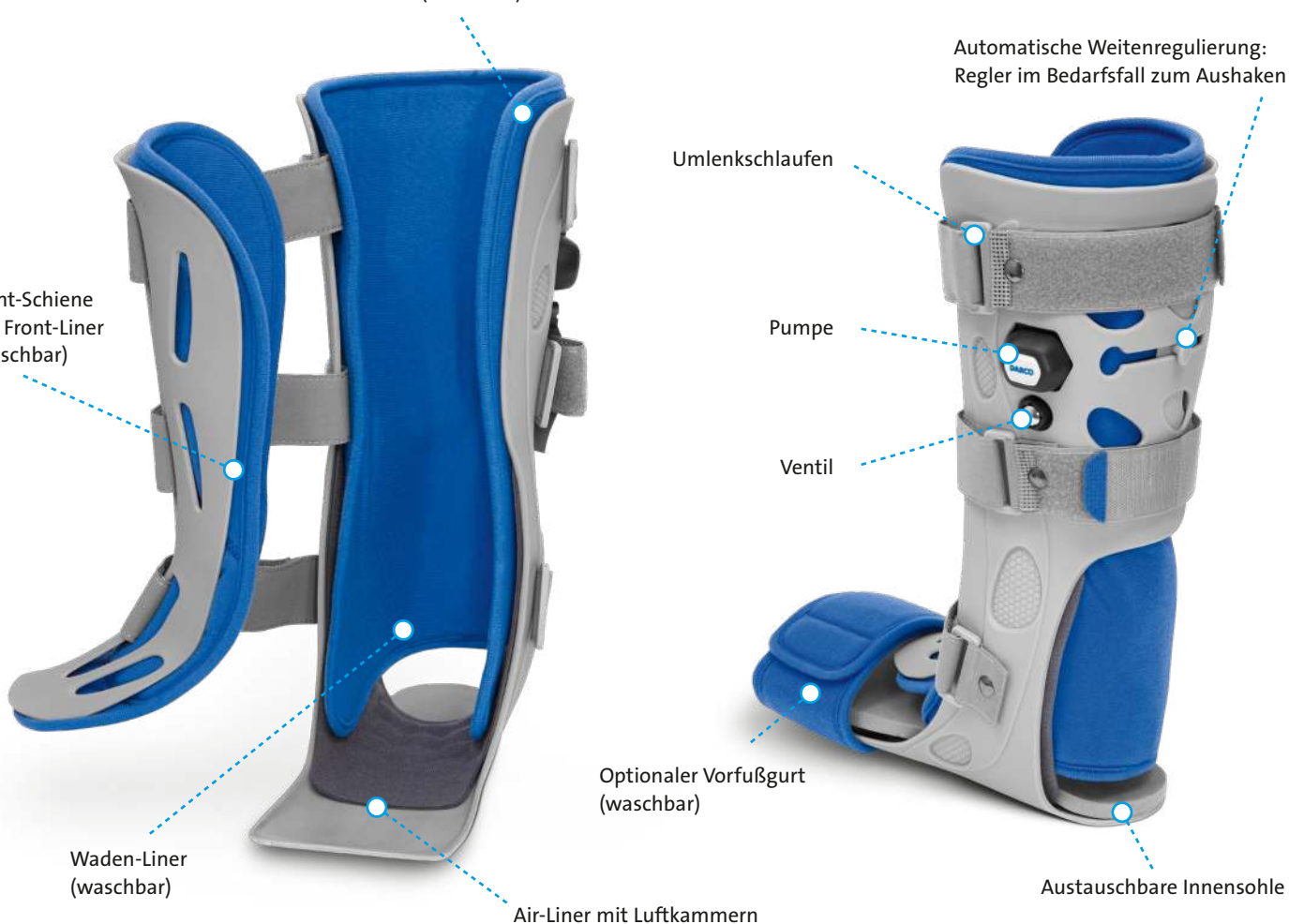



# Anwendung 2

## Unterschenkel-Fußorthese | Relief Insert® Walker 2.0

Der Relief Insert® Walker 2.0 ist sowohl eine Fußlagerungsorthese, als auch eine Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung des Unterschenkel-Fuß in vorgegebener Position, bei gleichzeitiger Mobilisierung. Mithilfe eines Therapieschuhs kann aus der Lagerungsschiene ein Walker zusammengestellt werden. Die auswechselbare Innensohle bietet eine individuelle Versorgung an den Patienten.

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.0070

### Indikationen

- > TMT 1 Arthrodesen (Lapidusarthrodesen)
- > Nach Metatarsalfaktur-Operationen
- > Nach Hallux Valgus-Operationen
- > Nach Hallux Rigidus-Operationen
- > Nach Hammer- und Krallenzehen-Operationen
- > Frakturen der Phalangen
- > Nach Rückfußoperationen
- > Bei Bandrupturen am Sprunggelenk
- > Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen (bei intakter Achillessehne)
- > Prä- und postoperative / posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- oder Knöchelfrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen
- > OSG Arthrodesen
- > Postoperativ nach Weberfrakturen

### Im Lieferumfang enthalten

- > Relief Insert® 2.0 Lagerungsschiene
- > Relief Dual® Plus Fußteilentlastungsschuh
- > Optionaler Vorfußgurt
- > Praktischer Rucksack



**Relief Insert® 2.0**  
Lagerungsschiene

**Relief Dual® Plus**  
Fußteilentlastungsschuh

# Anwendung 3

## Achilles-Walker | Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Der Relief Insert® Walker 2.0 Achill ist eine Unterschenkel-Fußorthese sowie Fußlagerungsorthese mit Achillessehnenentlastung. Die DAW Fersenkeile bestehen aus 3 Keilen in verschiedenen Längen. Ein Keil hat eine Höhe von ca. 11 mm. Je nach Anzahl der angewendeten Keile variiert die Erhöhung und der Spitzfußwinkel kann so individuell eingestellt werden. 3 Keile entsprechen ca. 120° Neigung. Entsprechend der Fußlänge und dem gewünschten Spitzfußwinkel werden die Keile übereinandergelegt und im Fersenbereich des Walkers mit Hilfe von Klebepunkten fixiert. Je nach Therapieverlauf können Schritt für Schritt die Keile entnommen und so die Höhe angepasst werden. Die Keile sind in einer Einheitsgröße erhältlich und somit universell für alle Größen des Walkers sowie rechts und links einsetzbar.

Hilfsmittelnummer: 23.06.01.1021

### Indikationen

- > Achillessehnenrupturen
- > Postoperativ bei Achillessehnennaht
- > Postoperativ nach Haglundexostosenabtragungen

### Im Lieferumfang enthalten

- > Relief Insert® 2.0 Lagerungsschiene
- > Relief Dual® Plus Fußteilentlastungsschuh
- > Optionaler Vorfußgurt
- > DAW (DARCO Achilles Wedges) Fersenkeile
- > Praktischer Rucksack



**Relief Insert® 2.0**  
Lagerungsschiene

**Relief Dual® Plus**  
Fußteilentlastungsschuh

**DAW (DARCO Achilles Wedges)**  
Fersenkeile

## Artikelliste

GRÖSSE      ART.-NR.      PZN      GRÖSSE      ART.-NR.      PZN



**Relief Insert® Walker 2.0**  
Unterschlenkel-Fußorthese

**Farbe: Grau-Blau**

XS	37,0 – 38,5	RIW2-0	18090274
S	39,0 – 41,0	RIW2-1	18090251
M	41,5 – 43,0	RIW2-2	18090245
L	43,5 – 45,0	RIW2-3	18090216
XL	45,5 – 47,0	RIW2-4	18090268



**Relief Insert® Walker 2.0 Achill**  
Achilles-Walker (inkl. Fersenkeile)

**Farbe: Grau-Blau**

XS	37,0 – 38,5	RIW2W-0	18090328
S	39,0 – 41,0	RIW2W-1	18090305
M	41,5 – 43,0	RIW2W-2	18090297
L	43,5 – 45,0	RIW2W-3	18090280
XL	45,5 – 47,0	RIW2W-4	18090311



**DAW (DARCO Achilles Wedges)**  
Fersenkeile für Walker

**Farbe: Grau**

Universal	DAW	18090179
-----------	-----	----------

## Kompatibel mit



PegAssist® Insole



PegContour® Insole



Relief Contour Insole



Puzzle Insole®




PegContour® Insole Uni



Toe Cap Zehenkappe

## Größen und Maße

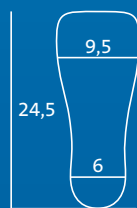

**XS 37–38,5**  
Innensohle und  
Zehenkappe = WM



**S 39–41**  
Innensohle und  
Zehenkappe = MS



**M 41,5–43**  
Innensohle und  
Zehenkappe = MM



**L 43,5–45**  
Innensohle und  
Zehenkappe = ML



**XL 45,5–47**  
Innensohle und  
Zehenkappe = MXL

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.



Video