

Neu: Body Armor® Pro Term Fußstumpforthese

Interimsversorgung nach Chopart- und Lisfranc-Amputationen



Indikationen

- > diabetisches Fußsyndrom
- > pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
- > Trauma

Postoperativ zur Behandlung nach

- > Chopart-Amputation
- > Lisfranc-Amputation



DARCO

Der Body Armor® Pro Term übernimmt viele hilfreich durchdachte Eigenschaften bewährter DARCO Produkte und ist so auch als Produktneuheit bereits ein typisches DARCO Produkt: durchdacht – patientenfreundlich – kosteneffektiv



weite Öffnung für leichtes Einsteigen



keilförmiges Sohlen-system für eine optimale Rückbelastung



praktisches Verschlussystem



perfekte Passform durch Luftkompression



einfaches Aufpumpen und Ablassen der Luft über integriertes System

Body Armor® Pro Term

Die Interimsversorgung von minor amputierten Patienten stellt für den Techniker bzw. Arzt immer eine Herausforderung dar. Deshalb erarbeitete unsere Entwicklungsabteilung eine adäquate, konfektionierte Versorgungsmöglichkeit. Die neue Fußstumpforthese von DARCO ist eine Interimsversorgung für eine circa 10-wöchige Tragedauer nach einer Amputation. Der Body Armor® Pro Term bietet eine Versorgungsmöglichkeit, bei der der Fußstumpf in dieser Zeit völlig ausheilen soll. Danach wird eine übliche Maßschuhversorgung vorgenommen.

Durch die keilförmige Lauf- und Innensohle in Dorsalextension ist eine Rückbelastung gewährleistet. Der stabile, knöchelübergreifende Schaft stabilisiert das obere sowie das untere Sprunggelenk und verhindert eine Deformierung des Stumpfes. Das blaue Inlay mit integrierter Pumpe komprimiert und hält dadurch die Stumpfform.

Der Body Armor® Pro Term stellt ein konfektioniertes Hilfsmittel dar, welches aber handwerklich verändert werden kann und so individuell auf die Patientenansprüche zugeschnitten wird.

ARTIKELNR.	GRÖSSE	STUMPF-LÄNGE
Farbe: Schwarz		
BAPT2	M	16 cm
BAPT3	L	19 cm

rechts und links tragbar