

# Body Armor® Cast Shoe Gipsschuh

Extrem leichter Gipsschuh. Komfort und Schutz für den Gips.

Verbessertes Design!



- > einfaches Anlegen durch Umklappen der Schuhferse (HeckEinstieg) und patentiertes Verschlusssystem
- > sicherer Fersenhalt
- > Zehenschutz
- > stoßhemmendes und sehr leichtes Material
- > schmutzabweisende Oberfläche für hygienisches und leichtes Reinigen
- > rechts und links tragbar



**DARCO**



## Der Body Armor® Cast Shoe ist besonders einfach und schnell angelegt.

- 1 Haken Sie den Bungee-Verschluss aus.
- 2 Drücken Sie den Knopf am Bungee-Verschluss in Richtung Zehen, um den Knöchelriemen zu weiten.
- 3 Durch das Zurückklappen der Schuhferse wird das Einsteigen zusätzlich erleichtert. Steigen Sie mit dem Fuß in den Schuh.
- 4 Zum Verschließen ziehen Sie den Knöchelriemen wieder zu und haken Sie den Verschluss wieder ein.
- 5 Fertig!



### Indikationen

> nach Gips- oder Cast-Versorgungen

### Wirkungsweise

> Komfort und Schutz für den Gips  
 > einfaches Anpassen an den Gips  
 > physiologisch korrektes Gangbild durch stabile Laufsohle

### Eigenschaften

> extrem leicht durch EVA Material  
 > sicherer Verschlussmechanismus  
 > stärkerer Bungee-Verschluss  
 > verbessertes Design – passt sich dem Fuß noch besser an  
 > rechts und links tragbar

### GRÖSSE

### ARTIKELNR.

#### Farbe: Dunkelgrau

XS	24,0 cm	CB0
S	25,5 cm	CB1
M	27,0 cm	CB2
L	29,0 cm	CB3
XL	32,0 cm	CB4
XXL	34,5 cm	CB5

Jetzt eine Größe zusätzlich für eine noch genauere Größendefinition.



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22 | info@darco.de | www.darco.de

