

WCS®

Langzeitverbandschuh

Langzeitverbandschuh für Diabetiker. Schuh zur gezielten Druckentlastung des Fußes.



- > bei Behandlung des diabetischen Fußsyndroms
- > zur Abheilung offener Wunden, Ulcera und Geschwüren
- > zur Druckentlastung
- > in der postoperativen Phase nach Zehen- und /oder Vorfußoperationen

> HiMi-Nr. 31.03.03.4023



DARCO

Der WCS® Langzeitverbandschuh für Diabetiker dient sowohl der Stabilität als auch der Stoß- und Druckentlastung des Fußes. Er kann ohne großen Aufwand individuell an jeden Patienten zur gezielten Entlastung angepasst werden. Durch seine Konstruktion und das handwerkliche Nachbearbeiten der vierschichtigen Innensohle wird eine zusätzliche Druckentlastung plantar, medial und lateral ermöglicht.



weite Öffnungsmöglichkeit

spezielle Schuhsohle

4-Sohlen-System

Sohlenzuschnitt Beispiel

- > einfacher Einstieg
- > viel Platz für Verbände

- > mehr Sicherheit
- > optimales Laufverhalten

- > unterschiedliche Shore-Härten
- > inklusive Bearbeitungsset
- > einfacher Zuschnitt

Querschnitt der Entlastung eines Druckulcus unter dem dritten Metatarsaleköpfchen

Die Vorteile des WCS® Langzeitverbandschuhs:

Bei einer Entlastung im dorso-medialen oder lateralen Anteil des Fußes (Malum perforans) kann, unabhängig vom Schweregrad, nur die äußere Lederschicht des Schuhoberteils im Bereich der Wunde entfernt werden. Das weiche Plastazote-Material des Innenschuhs bleibt dabei intakt, um sogenannte Fensterödeme am Wundrand zu vermeiden.

Der Aufbau, die weite Öffnungsmöglichkeit und die regulierbaren Klettverschlüsse ermöglichen eine Aufnahme von stark aufragenden Verbänden. Die Abrollsohle gewährleistet ein physiologisch korrektes Gangbild, wodurch der Schuh auch im Freien getragen werden kann.

Die Zehenkappe passend zu unserem offenen Langzeitverbandschuh vermeidet das Eindringen von Fremdkörpern und dient zum Schutz vor Kälte und Schmutz sowie als Stoßschutz der Zehen. Das dehnbare und luftdurchlässige Material der Zehenkappe sorgt für einen sicheren und angenehmen Tragekomfort.



TwinShoe® zum Höhenausgleich optional erhältlich.



Jetzt auch mit Anleitungsfilm!
www.darco.de/info-produktvideos

WCS®

GRÖSSE

ART.-NR.

		Rechts	Links
XS	35,0 – 36,0	WCS0B/R	WCS0B/L
S	37,0 – 38,0	WCS1B/R	WCS1B/L
S/M	39,0 – 40,0	WCS7B/R	WCS7B/L
M	41,0 – 42,0	WCS2B/R	WCS2B/L
L	43,0 – 44,0	WCS3B/R	WCS3B/L
XL	45,0 – 46,0	WCS4B/R	WCS4B/L
XXL	47,0 – 48,0	WCS5B/R	WCS5B/L

Farbe: Schwarz

Zehenkappe

ART.-NR.

	Rechts	Links
	TCWCS0/R	TCWCS0/L
	TCWCS1/R	TCWCS1/L
	TCWCS7/R	TCWCS7/L
	TCWCS2/R	TCWCS2/L
	TCWCS3/R	TCWCS3/L
	TCWCS4/R	TCWCS4/L
	TCWCS5/R	TCWCS5/L

Farbe: Schwarz

