

# MA Spacer (MIS Akin Spacer) Zehenseparator

Sichern Sie Ihr Ergebnis nach minimalinvasiven Akin Operationen ohne Osteosynthesematerial mit dem neuen Zehenseparator aus medizinischem Silikon.

Der aus weichem, viscoelastischem Silikon bestehende MA Spacer (MIS Akin Spacer) sichert das OP-Ergebnis durch Fixierung der korrigierten Zehen und passt sich dabei individuell der Zehenkontur an.

Das biokompatible Material ist abwaschbar und kann bei Bedarf desinfiziert werden.

## Indikationen

- > postoperative Versorgung bei minimalinvasiven Hallux Valgus OPs (Akin Osteotomie ohne Osteosynthesematerial)
- > konservative Versorgung bei Hallux Valgus

Neu bei DARCO



**DARCO**



## Postoperativer Versorgungsvorschlag

**Eine Woche nach OP**  
Tape-Zügelung und Einsetzen des Zehenseparators

**Für ca. 4–6 Wochen**  
Wöchentlicher Tape-Wechsel, hierbei wird der MA Spacer gereinigt und erneut eingesetzt

**Ab Woche 7**  
Für ca. 4 Wochen selbständige Anwendung des Zehenseparators durch Patient



Zurück im engen Alltagsschuh bleibt der Zwischenraum des 1. und 2. Zehs dank des MA Spacer erhalten.



### Wirkungsweisen

- > Sicherung des OP-Ergebnisses nach MIS Akin Operationen in ca. 10° Überkorrektur
- > auch konservativ einsetzbar
- > Korrektur und Trennung von enganliegenden Zehen
- > Fixierung und Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen in die gewünschte Position mit Hilfe von Tapes
- > schützt vor Druckschmerz

### Eigenschaften

- > biokompatibel und rutschfest
- > weiches und glattes medizinisches Silikon für hohen Tragekomfort
- > Material passt sich individuell der Kontur der Zehen an
- > kehrt nach dem Tragen sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- > einfache Handhabung
- > strapazierfähiges Material
- > Überkorrektur von ca. 10°
- > abwaschbar, bei Bedarf zu desinfizieren und daher hygienischer als andere Materialien
- > kosteneffizient, da nur 1 MA Spacer (MIS Akin Spacer) pro Patient
- > links und rechts tragbar

### Anwendung

Der MA Spacer (MIS Akin Spacer) wird mit dem langen Anteil dorsal in den Zwischenraum des 1. und 2. Strahls eingelegt und mit einem Tapezügel fixiert.

Als Sprechstundenbedarf (per Rezept, Praxis) bzw. Verbandsmaterial (Klinik) zu beziehen.

GRÖSSE	ART.-NR.	PZN
<b>Farbe: Weiß</b>   Einheitsgröße	MAS-20	15620205

Verpackungseinheit: 20 Stück

Made in Germany

ERGÄNZENDES PRODUKT

### MECRON ReadyDressment Strips | Elastische Stabilisierungszügel

Sofort einsatzbereite und elastische Pre-Cut Tapes eignen sich optimal zur Ausrichtung der operierten / korrigierten Zehen und zur Fixierung des MA Spacer.

